



## Configuration du son NeurOptimal<sup>®</sup> (NO3)


1. Faites un clic droit sur l'icône du son dans la barre des tâches et sélectionnez **Open Sound settings**.

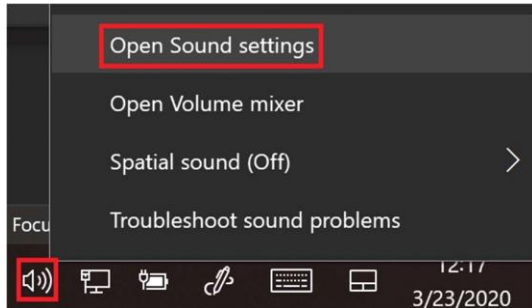


2. Dans les paramètres du son, ouvrez le **Sound Control Panel**.

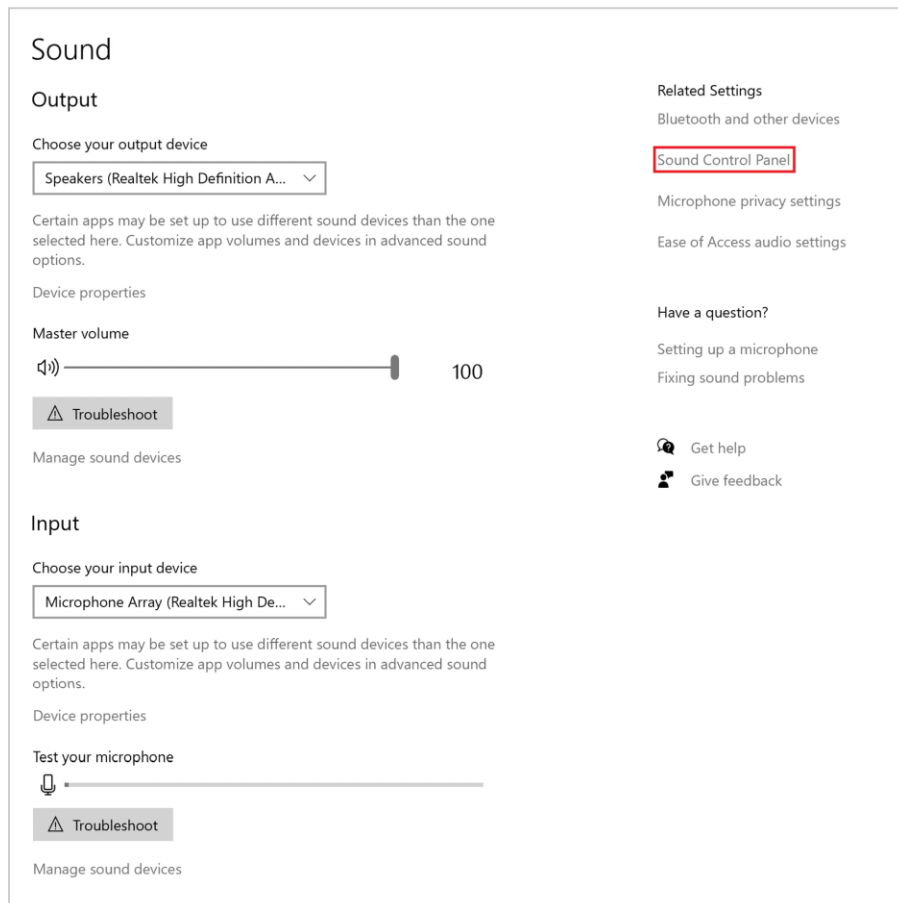


3. Vérifiez que l'onglet actuel est sur **Playback**. Ensuite, cliquez sur **Stereo In** pour le sélectionner, puis sur **Set Default**.

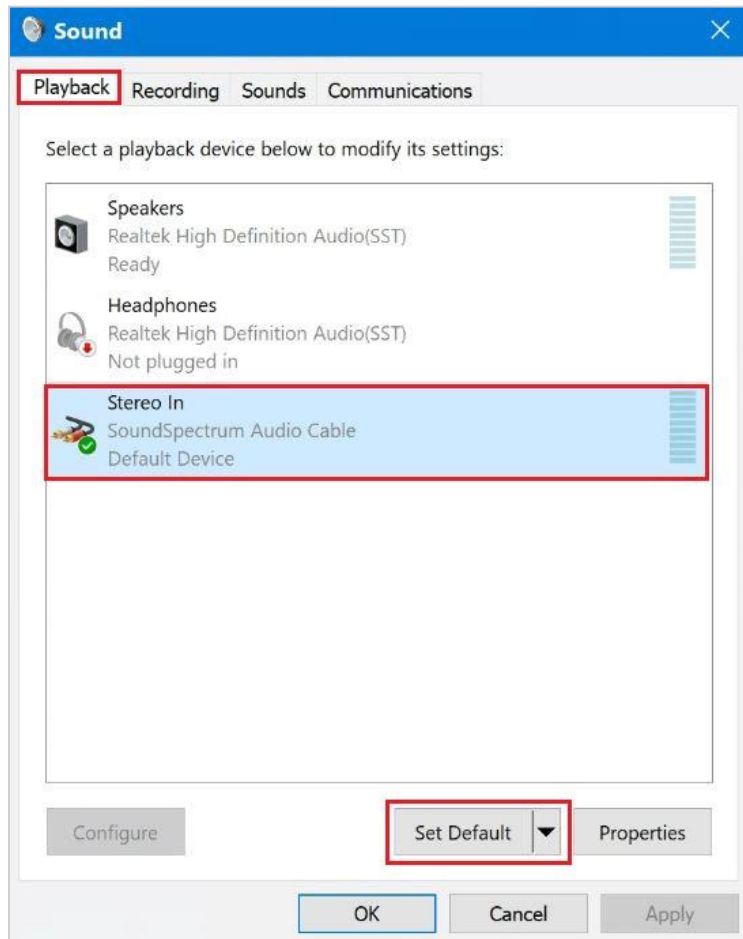


4. Vérifiez que l'onglet actuel est sur **Recording**, puis assurez-vous que **Microphone Array** est réglé sur **Default Device**.

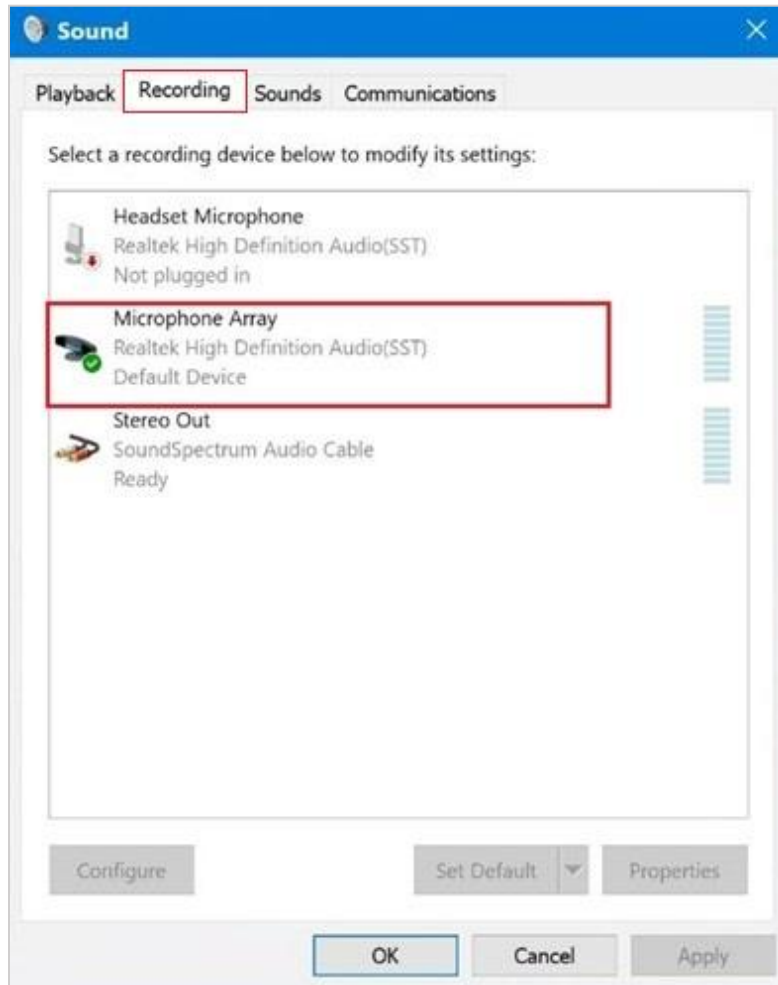


5. Cliquez à droite sur **Stereo Out** et ouvrez **Properties**

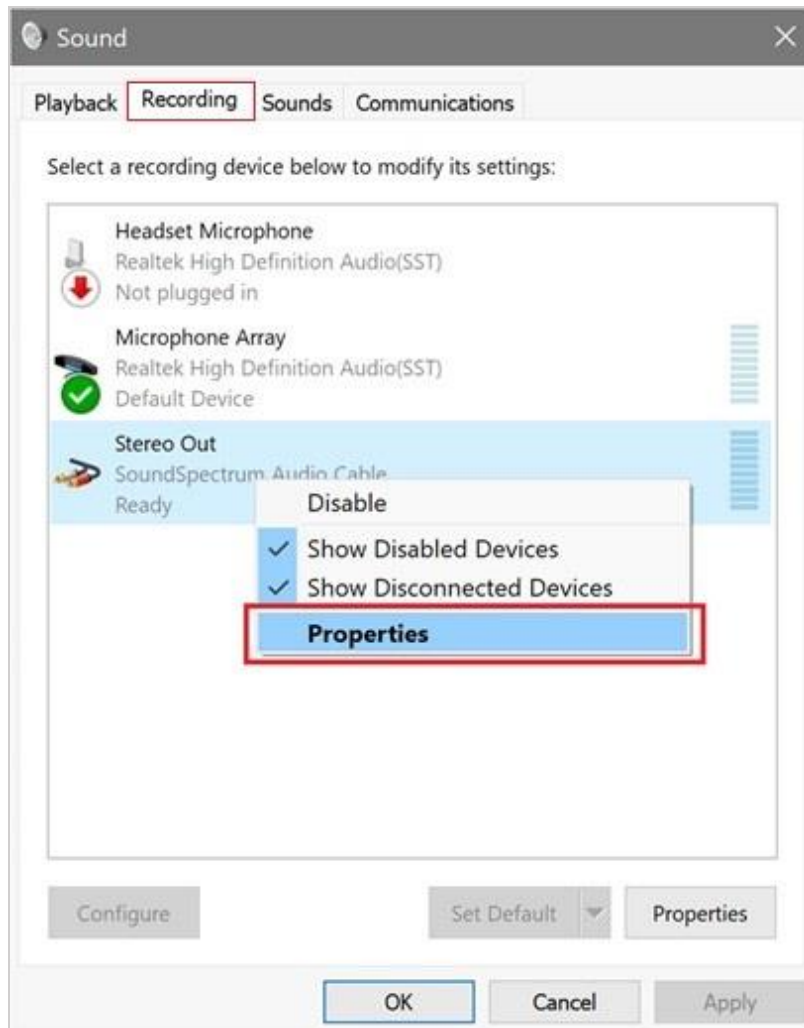


6. Dans l'onglet **General**, vérifiez que l'option **Use this device (enable)** est sélectionnée.

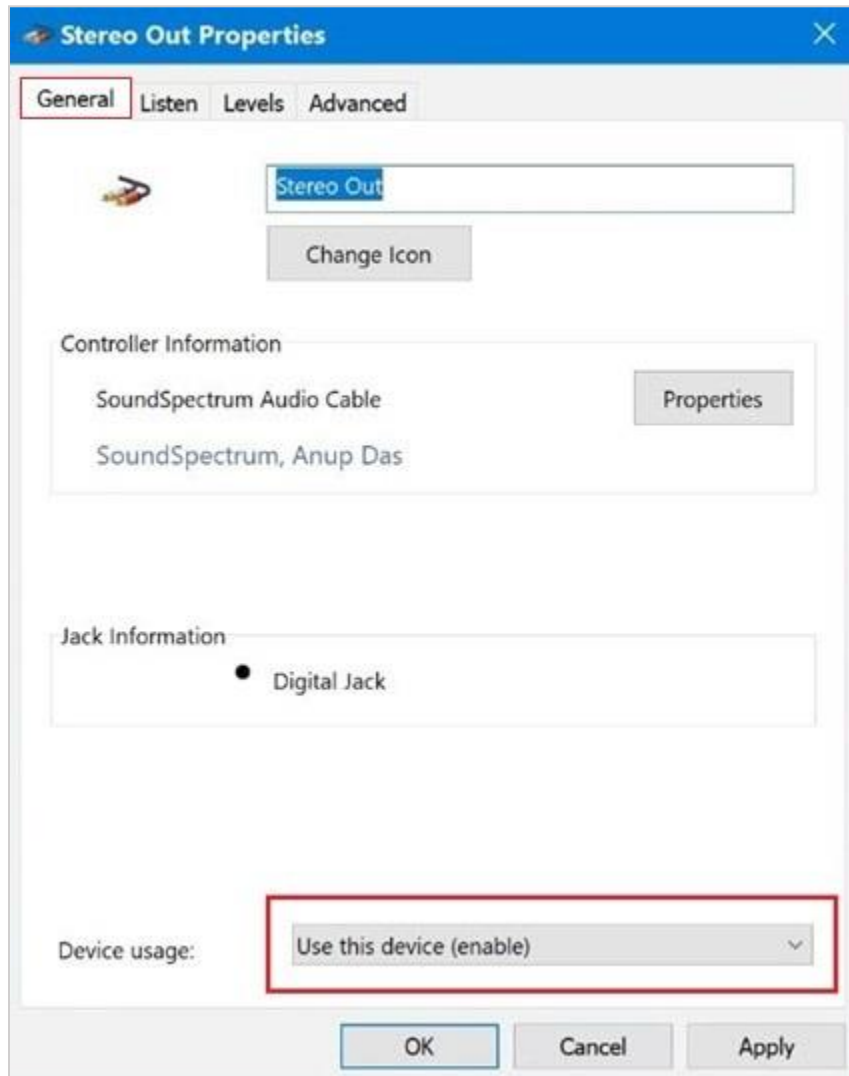

7. Dans l'onglet **Listen**, cochez **Listen to this device**. Sous **Playback through this device**, utilisez le menu déroulant et sélectionnez **Speakers (Realtek High Definition Audio (SST))**. Appuyez ensuite sur OK.

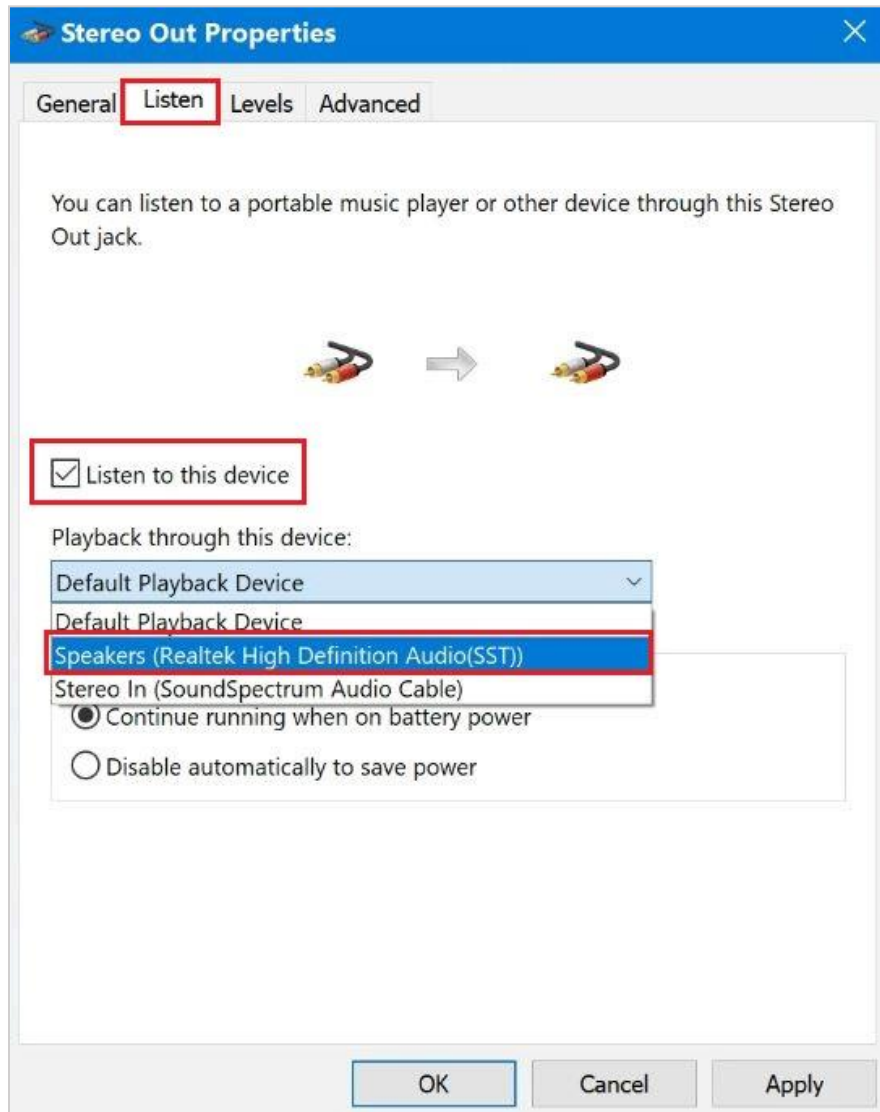

8. Cliquez sur l'icône du son dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Stereo In (SoundSpectrum Audio Cable)** pour afficher les autres options de son.

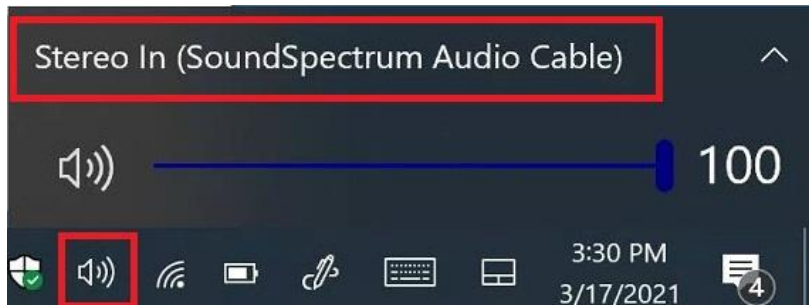

9. Cliquez sur (Realtek High Definition Audio (SST))

