

MAINTENANCE DU SYSTÈME

Zengar® recommande d'effectuer les opérations de maintenance suivantes sur votre système de façon régulière et en préparation d'une mise à jour du logiciel ou d'un ZenConnect :

1. Prévoyez suffisamment de temps pour effectuer le processus

(prévoyez de rester avec le système pendant le processus pour répondre à toutes les demandes qui se présentent)

2. Vérifiez et effectuez toutes les mises à jour de Windows 10

<https://neuroptimal.com/technical-support-faqs/#faq4>

(ne passez pas à Windows 11 pour le moment)

3. Exécutez le nettoyage du disque

<https://neuroptimal.com/technical-support-faqs/#faq5>

4. Optimiser le SSD/HD

<https://neuroptimal.com/technical-support-faqs/#faq6>

5. Si vous vous préparez pour une mise à jour, confirmez qu'au moins 20GB sont libres et disponibles sur votre SSD/HD

(les fichiers multimédias personnalisés peuvent être déplacés vers un lecteur externe/une carte microSD, le cas échéant)

6. Redémarrez le système

7. Lancez le processus de ZenConnect ou de mise à jour si vous le souhaitez.

(ZenConnect n'est pas nécessaire pour le processus de mise à jour)

(ne jamais arrêter une mise à jour en cours)